

Datum slanja pisma

GE HealthCare Ref. br. 80192

Za: Direktor kliničke službe/radiologije
Upravitelj rizika/administrator bolnice
Rukovoditelj odjela biomedicinskog inženjerstva
Direktora IT odjela

Predmet: **AW Server – potencijalna ranjivost u pogledu sigurnosti**

Sigurnosna pitanja

Tvrtka GE HealthCare postala je svjesna sigurnosne ranjivosti proizvoda AW Server. Ako se za AW Server ne kreira složena lozinka i zlonamjerna osoba dobije pristup mreži na kojoj je AW Server instaliran, ta bi se ranjivost mogla iskoristiti. Ako se to dogodi, zlonamjerna osoba mogla bi ugroziti povjerljivost, cjelovitost i dostupnost podataka pacijenata.

Tvrtki GE HealthCare nisu prijavljene ozljede kao posljedica ovog problema.

Radnje koje mora poduzeti klijent/korisnik

Svoj uređaj možete i dalje upotrebljavati uz poštovanje uputa u nastavku.

1. AW Server mora biti instaliran na internoj mreži ustanove, što znači da mu se **ne** može pristupiti s bilo koje javne mreže. Ako želite imati pristup uređaju AW Server izvan mreže ustanove, ta se veza mora konfigurirati isključivo putem usluge Virtual Private Network (VPN) ustanove ili ekvivalentnog rješenja za mrežnu sigurnost, kao što je opisano u Priručniku za postavljanje poslužitelja, koji je dostupan na portalu s korisničkom dokumentacijom (Customer documentation portal).

NAPOMENA: Za upravljanje pristupom internoj mreži ustanove na kojoj je instaliran AW Server i upravljanje rješenjem mrežne sigurnosti strogo je odgovorna ustanova.

2. Osigurajte konfiguriranje jakih, sigurnih lozinki za AW Server.
3. Tvrtka GE HealthCare preporučuje da ustanove poštuju najbolju praksu u području sigurnosti i kibernetičke sigurnosti, uključujući osiguravanje mreže s kojom je povezan AW Server.

Osigurajte da svi potencijalni korisnici u vašoj ustanovi budu upoznati s ovom obavijesti.

Čuvajte ovaj dokument u svojoj evidenciji.

Ispunite i vratite priloženi obrazac za odgovor na adresu
recall.80192@gehealthcare.com

Pojedinosti o proizvodima na koje se obavijest odnosi

Ovo se odnosi na sljedeće proizvode s verzijama softvera navedenim u nastavku

Proizvod	UDI referenca
AW Server 2.0 Ext. X	nije dostupno
AW Server 3.0 Ext. X	nije dostupno
AW Server 3.1 Ext. X	nije dostupno
AW Server 3.2 Ext. X	(01)00840682102384(10)AWS XXXXX

NAPOMENA: Ovo ne utječe na gore navedene proizvode kada se instaliraju izravno na GE HealthCare CT ili PET/CT skenere radi pružanja 3D funkcionalnosti aplikacije na konzoli skenera.

Popravak proizvoda

GE HealthCare će ispraviti sve proizvode na koje se obavijest odnosi bez ikakvih troškova za vas. Predstavnik tvrtke GE HealthCare javit će vam se kako biste dogovorili ispravak.

Podaci za kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s ovom obavijesti, obratite se servisnoj službi tvrtke GE HealthCare ili lokalnom servisnom predstavniku.

Tvrtka GE HealthCare potvrđuje da je ova obavijest prijavljena odgovarajućoj regulativnoj agenciji.

Budite uvjereni da je održavanje visoke razine sigurnosti i kvalitete naš najveći prioritet. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se putem gore navedenih podataka za kontakt.

Srdačan pozdrav,



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare



Scott Kelley
Chief Medical Safety Officer
GE HealthCare

**POTVRDA OBAVIJESTI O SIGURNOSTI NA TERENU
POTREBAN ODGOVOR**

Ispunite ovaj obrazac i vratite ga tvrtki GE HealthCare odmah po primitku, a najkasnije u roku od 30 dana. Time ćete potvrditi primitak i razumijevanje Obavijesti o sigurnosti na terenu.

Naziv ustanove: _____

Adresa: _____

Grad/Županija/Poštanski broj/Država: _____

Adresa e-pošte kupca: _____

Broj telefona kupca: _____

Potpisivanjem ovog obrasca potvrđujemo primitak i razumijevanje popratne Obavijesti o sigurnosti na terenu, te da smo obavijestili sve potencijalne korisnike, poduzeli i poduzet ćemo odgovarajuće radnje u skladu s tom Obavijesti.

Navedite ime odgovorne osobe koja je ispunila ovaj obrazac.

Potpis: _____

Ime tiskanim slovima: _____

Funkcija / naziv radnog mjesta: _____

Datum (DD/MM/GGGG): _____

Skenirajte ili fotografirajte ispunjeni obrazac te ga pošaljite e-poštom na adresu recall.80192@gehealthcare.com ili pošaljite internetski obrazac za odgovor.



QR kod za e-poštu



QR kod za internetski obrazac za odgovor