

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST



Datum slanja pisma

GE HealthCare Ref. br. 85480

Za: Direktora/voditelja odjela za radiologiju
Direktora/voditelja odjela za kardiologiju
Upravitelja rizika / administratora bolnice
Voditelja odjela za radiologiju
Voditelja odjela za kardiologiju
PACS administratora
Direktora IT odjela
Voditelja odjela za biomedicinsko inženjerstvo
Voditelja odjela za slikovnu informatiku

Predmet: **Centricity Universal Viewer (UV), Centricity PACS-IW (PACS-IW), Centricity Radiology RA600 (RA600) i Centricity Cardiology CA1000 (CA1000) – moguća ranjivost u pogledu sigurnosti**

Sigurnosna pitanja

Tvrtka GE HealthCare postala je svjesna moguće ranjivosti u pogledu sigurnosti proizvoda Centricity Universal Viewer (UV), Centricity PACS-IW (PACS-IW), Centricity Radiology RA600 (RA600) i Centricity Cardiology CA1000 (CA1000), gdje se mogu identificirati podaci za prijavu na razini serviseru, što može omogućiti zlonamjernoj osobi s tim podacima pristup sustavu i potencijalnu manipulaciju podacima pacijenata.

Tvrtki GE HealthCare nisu prijavljene ozljede ni neovlašten pristup podacima o pacijentima kao posljedica ovog problema.

Radnje koje mora poduzeti kupac/korisnik

Možete nastaviti koristiti uređaj.

Osigurajte da svi potencijalni korisnici u vašoj ustanovi budu upoznati s ovom sigurnosnom obavijesti.

Provjerite jeste li primijenili dolje navedene radnje:

- 1: osigurajte sigurnost svoje bolničke mreže
i
- 2: izvan bolničke mreže implementirajte dodatne zaštite kao što je VPN.

Čuvajte ovaj dokument u svojoj evidenciji.

Ispunite i vratite priloženi obrazac za odgovor na adresu recall.85480@gehealthcare.com.

Pojedinosti o proizvodima na koje se obavijest odnosi

Ovo se odnosi na sljedeće proizvode s verzijama softvera navedenim u nastavku.

Proizvod	Identifikacijski broj uređaja / GTIN
Centricity Universal Viewer, verzije softvera 7.0 do 7.0 SP1.0.3	00840682145794
Centricity Universal Viewer, verzije softvera 6.0 do 6.0 SP10.4.1	00840682103800
Centricity Universal Viewer, verzije softvera 5.0 do 5.0 SP7.1	nije dostupno
Centricity PACS-IW	nije dostupno
Centricity Radiology RA600, verzije softvera 7.0 do 7.0 SP13	nije dostupno
Centricity Radiology RA600, verzije softvera 8.0 do 8.0 SP14M	00840682125260
Centricity Cardiology CA1000, verzije softvera 1.0 do 1.0 SP13	nije dostupno
Centricity Cardiology CA1000, verzije softvera 2.0 do 2.0 SP14M	00840682125260

Popravak proizvoda

GE HealthCare će ispraviti sve proizvode na koje se obavijest odnosi bez ikakvih troškova za vas. Predstavnik tvrtke GE HealthCare kontaktirat će vas kako biste dogovorili popravak.

Podaci za kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s ovom obavijesti, obratite se servisnoj službi tvrtke GE HealthCare ili lokalnom servisnom predstavniku.

Tvrtka GE HealthCare potvrđuje da je ova obavijest prijavljena odgovarajućoj regulativnoj agenciji.

Budite uvjereni da je održavanje visoke razine sigurnosti i kvalitete naš najveći prioritet. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se putem gore navedenih podataka za kontakt.

Srdačan pozdrav,



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare



Scott Kelley
Chief Medical Safety Officer
GE HealthCare

**POTVRDA OBAVIJESTI O SIGURNOSTI NA TERENU
POTREBAN ODGOVOR**

Ispunite ovaj obrazac i vratite ga tvrtki GE HealthCare odmah po primitku, a najkasnije u roku od 30 dana. Time ćete potvrditi primitak i razumijevanje Obavijesti o sigurnosti na terenu.

Naziv ustanove: _____

Adresa: _____
Grad/Županija/Poštanski broj/Država: _____

Adresa e-pošte kupca: _____

Broj telefona kupca: _____

Potpisivanjem ovog obrasca potvrđujemo primitak i razumijevanje popratne Obavijesti o sigurnosti na terenu, te da smo obavijestili sve potencijalne korisnike, poduzeli i poduzet ćemo odgovarajuće radnje u skladu s tom Obavijesti.

Navedite ime odgovorne osobe koja je ispunila ovaj obrazac.

Potpis: _____

Ime tiskanim slovima: _____
Funkcija / naziv radnog mjesta: _____

Datum (DD/MM/GGGG): _____

Skenirajte ili fotografirajte ispunjeni obrazac te ga pošaljite e-poštom na adresu recall.85480@gehealthcare.com ili putem interneta pošaljite [Obrazac za odgovor kupca](#).



Poveznica na e-poštu za kupce



Obrazac za odgovor