

XX. siječnja 2024.

Savjetodavna obavijest / Preventivne sigurnosne informacije

**Predmet: FUJIFILM PRIJENOSNI DIGITALNI RENDGENSKI SUSTAV FDR nano**

Poštovani,

želimo Vas obavijestiti da je tvrtka FUJIFILM nedavno dobila dojavu da je pri pregledima provedenim na odjelima za pedijatriju, neonatologiju i ginekologiju došlo do izlaganja standardnim vrijednostima koje su predviđene za snimanje prsnog koša odraslih pacijenata i to bi moglo dovesti do rizika od prekomjernog izlaganja.

Nisu prijavljene ozljede pacijenata povezane s ovim problemom. Budući da isključivanje nije objašnjeno, vjerujemo da se ovaj problem mogao javiti zbog nedostatnog opisa u našem priručniku za korištenje.

Stoga Vam u ovom dopisu dostavljamo dodatne informacije.

Preporučujemo da provedete retrospektivnu analizu dozimetrijskih podataka, osobito na odjelima za pedijatriju, neonatologiju i ginekologiju, kako bi se identificirali pacijenti koji su eventualno bili izloženi prekomjernom zračenju.

Tvrtka FUJIFILM cijeni Vaše razumijevanje i suradnju. Molimo sačuvajte kopiju ovog dopisa uz priručnik za korištenje. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz ovaj dopis ili ako želite zakazati termin za dodanu obuku/obuku na radnom mjestu, molimo kontaktirajte <<local contact name >>, na <<local contact email >> i md-safetyofficer@fujifilm.com.

S poštovanjem,

<<sign>>

<< Dealer Details >>

**FUJIFILM PRIJENOSNI DIGITALNI RENDGENSKI SUSTAV FDR nano / Dodatne informacije**


## Upozorenje

- Uvijek kada se sklopka s ključem uključi, uvjeti izlaganja namješteni su na standardne vrijednosti (85 kV, 1,6 mAs, pribl. 0,13 mGy@ SID 1m) koje su predviđene za snimanje prsnog koša odraslih pacijenata. Prije izlaganja uvjerite se da su namješteni predviđeni uvjeti izlaganja.
- Nepostupanje u skladu s gore navedenim upozorenjem za posljedicu može imati prekomjerno izlaganje u odnosu na odabrano ispitivanje, osobito za djecu.
- Ako se uvjeti izlaganja namjeste iz konzole dok je sklopka s ključem isključena, namješteni se uvjeti izlaganja neće primijeniti.

uključivanje sklopke s ključem



Kada je sklopka s ključem uključena, upravljačka ploča s uvjetima izlaganja svijetli.

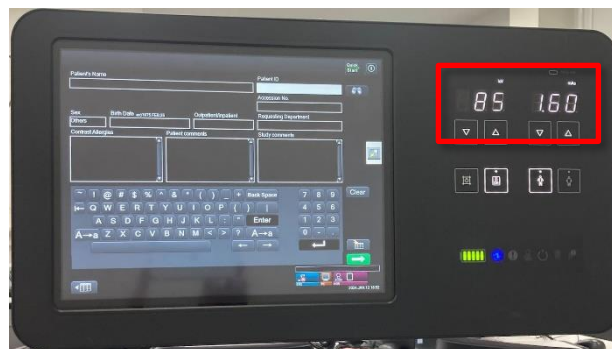

## Koraci za resetiranje uvjeta izlaganja

### 1. Zatvaranje Study screen

Izađite iz Study screen i ponovno započnite ispitivanje.  
Pritisnite [Complete] da izađete iz Study screen.




Study screen

## 2. Resetiranje ispitivanja

### 2.1 Kada je uređaj povezan na RIS

Ponovno započnite od odabira ispitivanja (vidjeti odjeljak 4.1.2 "Radni priručnik Console Advance (DR-ID 300CL)").

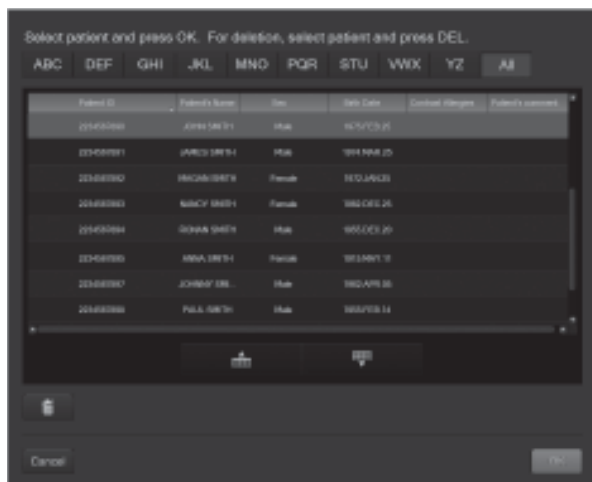

### 2.2 Kada je uređaj povezan na neki drugi sustav koji nije RIS

Ponovno započnite od odabira Exposure Menu (vidjeti odjeljak 4.2.1 "Radni priručnik Console Advance (DR-ID 300CL)").



## 3. Izlaganje

Prije izlaganja uvjerite se da su namješteni predviđeni uvjeti izlaganja.

Napomena: Za druge radne postupke pogledajte "Radni priručnik FDR nano".

Kraj datoteke