

Siemens Healthcare GmbH, HC DI XP F&U PRM, Siemensstr. 3, Healthcare Building 1, 91301 Forchheim

Osoba za kontakt u regionalnoj jedinici
Odjel

<Osobi nadležnoj za jedinicu u kojoj se koristi proizvodom tvrtke SIEMENS i administrativnom voditelju organizacije>

Telefon
Telefaks
E-pošta

Datum

Sigurnosna obavijest za korisnike

Svim korisnicima sustava SIEMENS AXIOM Luminos TF, AXIOM Iconos R100, AXIOM Iconos R200, AXIOM Luminos Agile, Luminos Agile Max, AXIOM Luminos dRF, Luminos dRF Max i LUMINOS Lotus Max

Osoba za kontakt u poslovnoj jedinici
Odjel

Monika Schwarz
SHS DI XP F&U PRM

Telefon +49 173 9655243
Telefaks
E-pošta

monika.schwarz@siemens-healthineers.com

Predmet: mogući rizik od odvajanja oslonca za stopala od stola za pacijenta

Poštovani korisnici,

ovim vas dopisom želimo obavijestiti o preventivnoj mjeri kojom se isključuje bilo kakav potencijalni rizik od ozljede pacijenta uzrokovan odvajanjem oslonca za stopala od stola za pacijenta tijekom pregleda.

Kada se ta opasnost može javiti i koji su potencijalni rizici?

Ako oslonac za stopala nije pravilno spojen i blokiran na stolu za pacijenta, postoji rizik od odvajanja te pacijent može skliznuti sa stola i ozlijediti se.

Koje korake korisnik može poduzeti kako bi spriječio potencijalni rizik nastanka tog problema?

- Korisnik mora svaki put provjeriti je li oslonac za stopala blokiran na svome mjestu i dobro pričvršćen prije nego što dopusti pacijentu da sjedne ili stane na njega.
- Dvije zelene trake na svakoj strani oslonca za stopala moraju biti vidljive.
- Oslonac za stopala smije se pričvrstiti i ukloniti isključivo kada je stol u vodoravnom položaju.

Siemens Healthcare GmbH
Uprava: Bernhard Montag, predsjednik i glavni izvršni direktor;
Darleen Caron, Jochen Schmitz, Christoph Zindel

Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Njemačka

Telefon: +49 (9191) 180
siemens.com/healthcare

Predsjednik nadzornog odbora: Ralf P. Thomas
Sjedište društva: München, Njemačka; trgovački registar: München, HRB 213821
WEEE-reg.-br. DE 64872105

Za pričvršćivanje oslonca za stopala pridržavajte se uputa u priloženom dodatku korisničkom priručniku vašeg sustava.

Koje je krajnje rješenje problema i na koji će se način primijeniti korektivna radnja?

Ovaj sigurnosni dopis distribuira se svim zahvaćenim korisnicima zajedno s dodatkom korisničkom priručniku. Dodatak sadrži dodatne pojedinosti i ilustracije o tome kako sigurno pričvrstiti oslonac za stopala u svrhu boljeg razumijevanja rukovanja osloncem za stopala.

Pobrinite se da svi pojedinci koji rukuju sustavom budu obaviješteni o sadržaju ovog dopisa i dodatku korisničkom priručniku.

Hvala vam na razumijevanju i suradnji u vezi s ovom sigurnosnom obavijesti za korisnike i molimo vas da sukladno tome odmah obavijestite svoje zaposlenike. Molimo vas da ovu sigurnosnu obavijest za korisnike i dodatak korisničkom priručniku priložite uputama za uporabu sustava.

Ako ste prodali ovaj uređaj/opremu i ako više nije u vašem vlasništvu, molimo vas da ovu sigurnosnu obavijest prosljedite novom vlasniku tog uređaja/opreme. Molimo da nas obavijestite o novom vlasniku uređaja/opreme.

S poštovanjem,

Verena Schön
Rukovoditelj odjela za poslovanje
X-Ray Products

Christian Denger
Rukovoditelj upravljanja kvalitetom
X-Ray Products